

PRIMUS 3D

INFOBLATT FÜR KUNDEN



PRIMUS 3D



DAUMENORTHESE ZUR STABILISIERUNG DES DAUMENS

Unsere Daumenorthese dient der Stabilisierung des Daumengelenks. Sie wurde entwickelt, um bestimmte Indikationen zu behandeln und ist für Kund:innen bestimmt, deren Körpermasse den Angaben in der Größentabelle entsprechen.

INDIKATION

- Arthrose des Daumens (Rhizarthrose)
- Ruhigstellung bei Schmerzen oder Verletzungen am Daumen

KONTRAINDIKATIONEN

Verwenden Sie das Produkt nicht bei unsicherer Diagnose, bei Allergien auf einen der Bestandteile oder direkt auf geschädigter Haut.

EIGENSCHAFTEN

- Stabilisierung des Daumen durch 3D-gedruckte Konstruktion
- Atmungsaktive Struktur
- Klettband zur Erleichterung des Anziehens

ZUSAMMENSETZUNG

Polyamid, Polyester, Elasthan, thermoplastisches Polyurethan

ANZIEHEN

- Öffnen Sie die Handgelenkgurte.
- Führen Sie den Daumen in die Orthese ein.
- Führen Sie den Handgelenkgurt durch die Verschlusschlaufe und justieren Sie diesen.
- Justieren Sie den Daumengurt.
- Legen Sie die schwarze Naht in die Mitte der Handfläche.

PFLEGEHINWEISE / AUFBEWAHRUNG

- Waschbar in der Maschine bei 30°(Schonwaschgang), Klettverschlüsse vor dem Waschen schliessen, keine Reinigungsmittel, Weichspüler oder aggressive Produkte (chlorhaltig oder ähnlich) verwenden, nicht für Trockner geeignet, nicht bügeln, keine Trockenreinigung, fern von direkten Wärmequellen (Heizkörper etc.) trocknen lassen
- Bei Raumtemperatur aufbewahren

VORSICHTSMASSNAHMEN / NEBENWIRKUNGEN

- Erste Anwendung unter Aufsicht einer medizinischen Fachkraft.
- Befolgen Sie strikt die Empfehlungen der medizinischen Fachkraft.
- Ziehen Sie das Produkt angemessen fest, um eine sichere Fixierung ohne Beeinträchtigung des Blutkreislaufes zu gewährleisten.
- Vor jeder Verwendung Unversehrtheit des Produkts prüfen, keine Verwendung bei Beschädigung.
- Aus hygienischen und leistungsbezogenen Gründen nicht für andere Patient:innen verwenden.
- Nehmen Sie das Produkt bei unerwünschten Nebenwirkungen wie Unwohlsein, übermässigen Beschwerden, Schmerzen, Änderung des Gliedmassenvolumens, ungewöhnlichen Empfindungen oder Verfärbungen der Extremitäten ab und konsultieren Sie eine medizinische Fachkraft.

ENTSORGUNG

Den Vorschriften entsprechend entsorgen oder im ORTHO-TEAM abgeben.

BEWEGUNG MADE IN SWITZERLAND

BERN

T. 031 388 89 89
info@ortho-team.ch

BURGDORF

T. 034 420 10 10
burgdorf@ortho-team.ch

THUN

T. 033 222 30 55
thun@ortho-team.ch

HERZOGENBUCHSEE

T. 062 961 91 33
info@ortho-team.ch

FRIBOURG

T. 026 323 10 23
fribourg@ortho-team.ch

INTERLAKEN

T. 033 826 40 48
info@ortho-team.ch

NATERS

T. 027 923 24 24
wallis@ortho-team.ch

BASEL

T. 061 691 62 70
basel@ortho-team.ch

LIESTAL

T. 061 921 47 00
basel@ortho-team.ch

SOLOTHURN

T. 032 624 11 55
solothurn@ortho-team.ch

BIEL

T. 032 624 13 00
solothurn@ortho-team.ch

LUZERN

T. 041 429 08 08
luzern@ortho-team.ch

SURSEE

T. 041 921 10 99
sursee@ortho-team.ch

AARAU

T. 062 388 03 06
aarau@ortho-team.ch

ZUG

T. 041 429 08 08
zug@ortho-team.ch

ZÜRICH

T. 044 422 46 22
zuerich@ortho-team.ch

SCHWYZ

T. 041 811 11 55
schwyz@ortho-team.ch

SCHAFFHAUSEN

T. 052 625 21 12
schaffhausen@ortho-team.ch

WINTERTHUR

T. 052 209 01 90
winterthur@ortho-team.ch

ST. GALLEN

T. 071 222 63 44
stgallen@ortho-team.ch

Anerkannter Partner bei Unfallversicherungen und Krankenkassen