


BEWEGUNG MADE IN SWITZERLAND

STANDORTE
& KONTAKT

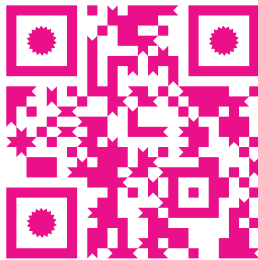

SPACE BRACE 3D

INFOBLATT FÜR UNSERE
KUNDEN UND KUNDINNEN

Anerkannter Partner bei Unfallversicherungen und Krankenkassen



SPACE BRACE 3D

INDIKATIONEN

- Bandinstabilitäten im OSG (oberes Sprunggelenk) und USG (unteres Sprunggelenk)
- Instabilitäten im Bereich des Chopart- und Lisfranc-Gelenks
- Akute Verletzungen: Anwendung für 6 Wochen Tag und Nacht
- Zur Rezidivprophylaxe bei starker Belastung (z.B. Sport, körperlich fordernde Tätigkeiten)
- Postoperativ nach Bandrekonstruktionen
- Prophylaktisch zur Stabilisierung bei bekannter Bandlaxität
- Geeignet bei Schweregrad 3-4 nach allgemeingültiger Skala

EIGENSCHAFTEN

- Sehr stabile, abnehmbare Orthese
- Anwendung bei posttraumatischen und postoperativen Zuständen sowie zur Prophylaxe
- Nachhaltig produziert im 3D-Druckverfahren, direkt in der Schweiz
- Alltagstauglich durch schlankes Design
- Passt in normale Schuhe
- Kombinierbar mit Kompressionssocken

ANWENDUNGSHINWEISE

- Tragedauer bei frischen Verletzungen: 6 Wochen Tag und Nacht
- Zur Vermeidung von Rezidiven bei hoher Belastung
- Tragezeit und Umfang der Anwendung richten sich nach ärztlicher Empfehlung



① Klettverschluss oben schliessen

② Kreuzzüge schliessen

PFLEGEHINWEISE

- Den festen Kunststoffteil unter fließendem Wasser oder mit einem feuchten Lappen reinigen.
- Das Futter und die Verschlüsse bei 30° im Schonwaschgang oder per Handwäsche waschen.